

伯优®唾液采集器套装使用说明书

产品货号:11902-50

Ver 25.04

【产品介绍】

本产品包含唾液采集装置及样本保存液,在室温条件下可长期有效保存唾液样本中的DNA,可直接用于后续DNA提取。

【产品组分】

产品货号	产品组分	组分货号	产品规格	数量
11902-50	伯优®唾液采集器套装	11902-01	1人份	50

【储存条件】

室温保存

【有效期】

24个月

【操作流程】

① 在唾液采集前30分钟,用饮清水漱口1-2次将口腔内的杂物洗漱干净。

注意:期间请勿进食、饮水、吸烟及嚼口香糖等,避免杂物及痰液的混入。

② 用舌尖抵住上颚或下颚齿根以富集唾液,向采集漏斗中轻轻吐入唾液,直至液体唾液(非气泡)达到1mL刻度线高度。

③ 手持唾液采集管,使其处于直立状态。旋开另一保存液储存管,将唾液保存液缓缓倒入采集漏斗内,保持直立,使唾液保存液能完全流入采集管中。

④ 保持采集管处于直立状态,小心从采集漏斗上旋下采集管。

⑤ 用唾液采集管的盖子将采集管拧紧。

⑥ 上下颠倒采集管5次,使唾液与保存液充分混匀。丢弃使用过的采集漏斗及保存液管。

⑦ 采集的样品在常温下可长期保存。

